



Ηλεκτρονική αντιψευερική χτένα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Πληροφορίες σχετικά με τις ψείρες.

Η ψείρα είναι ένα έντομο, που παρασιτεί στο τριχωτό της κεφαλής των ανθρώπων των οποίων ρουφά το αίμα και στους οποίους μπορεί ενίοτε να μεταδώσει ασθένειες. Είναι ένα μικρό έντομο χωρίς φτερά, με μέγεθος μικρότερο των 3 mm. Το χρώμα του ποικίλλει από ανοικτό γκριζωπό έως

καστανό. Το θηλυκό προτιμώντας τις θερμότερες περιοχές, εναποθέτει στις ρίζες των μαλλιών, ένα μικρό λευκό αυγό 0,5 mm που ονομάζεται κόνιδα και προστατεύεται από ένα στερεό κέλυφος. Για την εκκόλαψη απαιτούνται 7 έως 10 ημέρες. Στις περισσότερες των περιπτώσεων στα μαλλιά που έχουν ψείρες μπορεί να βρίσκονται περίπου μια ντουζίνα ψείρες, οι οποίες χωρίς θεραπεία, μπορεί να φτάσουν γρήγορα τις 200.

Επειδή η ψείρα δεν μπορεί να πηδήξει ή να πετάξει, η μετάδοση γίνεται κυρίως μέσω της άμεσης επαφής δύο κεφαλιών, που επιτρέπει στο έντομο να περάσει εύκολα από το ένα κεφάλι στο άλλο περπατώντας με τα πόδια του.

Μόνο σε σπάνιες περιπτώσεις, δεν μεταδίδονται μέσω πετσωτών κλινικοσκεπασμάτων, ρούχων ή των κατοικίδιων ζώων.

Σε αντίθεση με αυτό που όλοι πιστεύουμε η ψείρα αγαπά όλους τους τύπους μαλλιών και όχι μόνο τα βρώμικα μαλλιά, και δεν κάνει διακρίσεις ως προς την ηλικία ή το φύλο.


Τρόπος λειτουργίας της ηλεκτρονικής χτένας.

Η ηλεκτρονική αυτή χτένα εξαλείφει τις ψείρες χωρίς χρήση χημικών προϊόντων.

Μόλις τα δόντια της χτένας έρθουν σε επαφή με μια ψείρα, παράγουν ηλεκτρικούς παλμούς οι οποίοι είναι εντελώς ακίνδυνοι για τους ανθρώπους, όμως, είναι θανατηφόροι για το παράσιτο. Διαβάστε πριν από την πρώτη χρήση προσεκτικά αυτές τις οδηγίες και ακολουθήστε τες πιστά.

- Μην χρησιμοποιείται σε παιδιά κάτω των 3 ετών.
- Τα μαλλιά πρέπει να είναι εντελώς στεγνά και ποτέ υγρά.

Περιγραφή Ηλεκτρονικής αντιψευερικής χτένας.

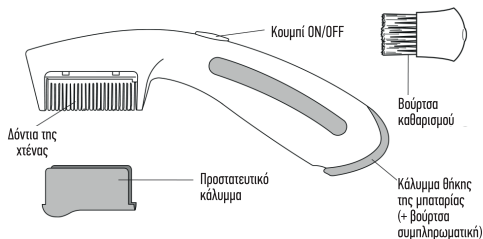

Ειδικά χαρακτηριστικά

Η αντιψευερική χτένα Medicaid όχι μόνο εξαλείφει τις ψείρες, αλλά εξουδετερώνει και τα αυγά της ψείρας (κόνιδες) από τα μαλλιά μέσω της ηλεκτρικής τάσης που εναλλάσσεται γρήγορα από 120-180 V η οποία δεν γίνεται αισθητή από τον άνθρωπο και είναι εντελώς ακίνδυνη.

Κατά τη χρήση της χτένας ακούγονται διάφοροι ήχοι:

- **Θέση σε λειτουργία:**
1 ηχητικό σήμα (μπιπ) κάθε 3 δευτερόλεπτα + ο διακόπτης ON/OFF φωτίζεται.
- **Ανίχνευση ενός παρασίτου:**
3 ηχητικά σήματα (μπιπ) + φωτίζεται ο διακόπτης ON/OFF αναβοσβήνει.
- **Αυτόματη απενεργοποίηση:**
Η χτένα θα σβήσει αυτόματα αν δεν χρησιμοποιηθεί για 5 λεπτά ή αν επί 5 λεπτά δεν εντοπιστεί παράσιτο.

Τοποθέτηση μπαταριών

Ανοίξτε το καπάκι της θήκης της μπαταρίας. Τοποθετήστε δύο μπαταρίες AAA τοποθετώντας σωστά τους πόλους (+/-) όπως αναγράφεται στο μεταλλικό μέρος του καπακιού.

Το ηχητικό σήμα δείχνει ότι οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί σωστά.

Χρήση

- Κρατήστε πατημένο το διακόπτη on/off για 2 δευτερόλεπτα. Ο διακόπτης on / off φωτίζεται και το ηχητικό σήμα (μπιπ) που ακούγεται κάθε 3 δευτερόλεπτα δείχνει ότι η συσκευή έχει τεθεί σε λειτουργία. Χρησιμοποιήστε αυτή τη συσκευή όπως μια κανονική χτένα. Βεβαιωθείτε ότι τα μαλλιά σας είναι στεγνά.
- Κρατήστε τη χτένα με κλίση 45 έως 90 ως προς το τριχωτό της κεφαλής και κτενίστε τα μαλλιά απαλά και από τη ρίζα προς τις άκρες.
- Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, ακούγεται ένα ηχητικό σήμα κάθε 3 δευτερόλεπτα και ο διακόπτης ON/OFF φωτίζεται.
- Όταν τα δόντια της χτένας έρθουν σε επαφή με κάποιο παράσιτο, ακούγονται 3 συνεχόμενα ηχητικά σήματα και ο διακόπτης ON/OFF αναβοσβήνει.

- Αν τα ηχητικά σήματα συνεχίσουν να ακούγονται, χρησιμοποιήστε τη βούρτσα καθαρισμού, για την αφαίρεση των υπολειμμάτων που έχουν παραμείνει ανάμεσα στα δόντια της χτένας.
- Μετά τη χρήση απενεργοποιήστε τη συσκευή κρατώντας πατημένο τον διακόπτη on / off για 2 δευτερόλεπτα.
- Καθαρίστε καλά τα δόντια της χτένας με το βουρτσάκι καθαρισμού. Μην χρησιμοποιείτε κανένα υγρό και μην βυθίζετε τη χτένα σε υγρό.
- Μην βουτίζετε τη συσκευή σε καμιά περίπτωση στο νερό ή σε οποιοδήποτε υγρό.
- Ξαναβάλτε στη θέση του το προστατευτικό καπάκι.
- Η αντιφθειρική χτένα εξουδετερώνει και τις ψείρες σε ενήλικες. Είναι απαραίτητο να επαναλαμβάνετε καθημερινά τη χρήση για περίπου 2 εβδομάδες για να είστε σίγουροι ότι όλες οι ψείρες έχουν εξουδετερωθεί.
- Για να αποφευχθεί νέα προσβολή, συνιστάται η τακτική χρήση της συσκευής για να εντοπίσουμε την πιθανή ύπαρξη ψειρών και να τις εξοντώσουμε άμεσα.

Οδηγίες για την ασφαλή χρήση

- Η χτένα αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε:
 - Παιδιά κάτω των 3 ετών.
 - Ανθρώπους που πάσχουν από επιληψία, καρδιακές παθήσεις ή φορούν βηματοδότη.
 - Τρικωτό κεφαλής που έχει πληγές ή μικρά τραύματα.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να χρησιμοποιούν μόνο τους τη συσκευή αλλά μόνο υπό την επίβλεψη ενός ενήλικα.
- Μην χρησιμοποιείτε τη χτένα κοντά σε κινητά τηλέφωνα, σε φούρνο μικροκυμάτων ή σε τηλεόραση (σε απόσταση μικρότερη του ενός μέτρου).
- Εναλλάξ στα δόντια της χτένας υπάρχει ένα μαύρο άκρο. Μετά από κάθε χρήση ελέγξτε αν όλα τα μαύρα άκρα είναι στη θέση τους. Εάν ένα από αυτά λείπει, η συσκευή δεν θα πρέπει να ξαναχρησιμοποιηθεί.
- Μην χρησιμοποιείτε σε υγρό και μπερδεμένα μαλλιά.
- Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια, τα αυτιά και το στόμα.
- Καθαρίστε τη χτένα προσεκτικά και τακτικά χωρίς νερό μετά από κάθε χρήση, κυρίως πριν από τη χρήση σε άλλο παιδί. Μην βάζετε τη χτένα ποτέ κάτω από νερό. Οποιοδήποτε υγρό μπορεί να την καταστρέψει.
- Χειριστείτε τη συσκευή με προσοχή, μην τη ρίχνετε και μην τη κτυπάτε. Διατηρείστε την σε ξηρό περιβάλλον και προφυλάξτε την από πηγές θερμότητας. Αποφύγετε την εκτεταμένη έκθεση στον ήλιο.
- Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή. Βγάλτε τις μπαταρίες αν σκοπεύετε να μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για αρκετό καιρό.

Τεχνικές Προδιαγραφές

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ:	EC – 1004
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ:	2 μπαταρίες τύπου AAA
ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ:	≥ 30μΑ
ΡΕΥΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:	≥ 30mA
ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:	50 – 160 V
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ:	≥ 35 Ma σε κατάσταση λειτουργίας
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ:	8 ώρες συνεχούς λειτουργίας
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ:	Μετά από 5 λεπτά μη λειτουργίας
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:	177*34*39 mm
ΒΑΡΟΣ:	200 γρ
ΤΥΠΟΣ:	Ιατρικές συσκευές Class I – ROHS CE

UM130117_004A



16° χλμ. Θεσσαλονίκης - Μουδανιών,
570 01, Ν. Ρύσιο, (Φαρμακαίικα) Θεσσαλονίκη,
Τ: 2316 002 740

biopharm.gr

